

REHABIQ

NANO RESPIRÁTOR NMO1

TRIEDA FFP2 NR

Jednorazový

Filtračná polomaska proti časticiam

Účinnosť filtrácie na častice NaCl aerosolu: ≥ 97%

Účinnosť na záchyt vírusov a baktérií: > 99,9%

Priedušnosť 140 l / m² / s umožňuje ľahké dýchanie.

Účinnosť materiálu 12 hodín.

Spĺňa normu EN 149: 2001 + A1: 2009.

FFP2

Rehabiq nanovláknový respirátor NMO1 je osobným ochranným prostriedkom podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/425, osobné ochranné prostriedky.

NÁVOD NA POUŽITIE Verzia 24. 2. 2021

Nasadenie nano respirátora:

1. **Umyte si ruky** mydlom a teplou vodou. **Utrite si ruky.**
2. **Vyberte respirátor** z obalu a uchopte ho za gumičky tvarovateľným okrajom smerom nahor.
3. Roztvorte respirátor a **priložte ktvári** tak, aby **zakrýval nos aj ústa**, pripevnite **gumičky za uši**.
4. **Vytvarujte vystužený okraj** podľa tvaru nosa.
5. **Preverte tesnosť** respirátora a pritlačte okolo nosa.

Na respirátor počas nosenia nesiahajte.



Bezpečné odstránenie nano respirátora:

1. **Umyte si ruky** mydlom a teplou vodou. Utrite si ruky.
2. **Nedotýkajte sa** prednej strany respirátora.
3. S respirátorom manipulujte iba **pomocou gumičiek**.
4. Uchopte obe gumičky a opatrne **zložte respirátor**.
5. **Umyte si ruky** mydlom a teplou vodou.

Pri opakovanom použití hrozí nebezpečenstvo kontaminácie.



UPOZORNENIE

- pred použitím skontrolujte, že nie je poškodený respirátor ani jeho obal
- poškodený respirátor nezabezpečuje plnú ochranu
- vždy sa uistite, že je respirátor kompletný, správne nasadený a nosený po celú dobu expozície
- tento prostriedok nechráni proti plynom / výparom
- nepoužívajte tento prostriedok ako ochranu pred atmosférickými kontaminantami, ktorých koncentrácie nie sú známe, alebo sú bezprostredne nebezpečné pre zdravie či život
- nasadzujte respirátor na oholenú tvár, fúzy zabraňujú kontaktu respirátora s tvárou, čo vedie k zníženej ochrane respirátora
- tento prostriedok neeliminuje riziko kontraktácie choroby či infekcie
- neodporúča sa čistenie, pranie ani žehlenie respirátora
- tento prostriedok je určený len na jednorazové použitie
- opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu, ohroziť bezpečnosť používateľa a zhoršiť celkový výkon produktu
- Rehabiq nano respirátor NMO1 bezodkladne zničte a vymeňte, ak dôjde ku kontaminácii krvou alebo inými infekčnými kontaminantami, ak je poškodený, ak spôsobuje väčšie ťažkosti s dýchaním
- po použití zaistíte likvidáciu v súlade s požiadavkami smernice na likvidáciu nebezpečného infekčného materiálu
- kontaminované výrobky treba likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade s národnými predpismi
- akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo súvislosti s týmto prostriedkom ohlásť spoločnosti Rehasport Trade, s.r.o. a príslušnému miestnemu kontrolnému úradu
- tento prostriedok nie je ohňovzdorný
- nepoužívajte v priamom kontakte s otvoreným ohňom
- nepoužívajte v ovzduší obsahujúcom menej ako 19,5% kyslíka, ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc
- dátum expirácie nájdete na spodnej strane obalu

Notifikovaná osoba GÉPTESZT Kft. (2233) (Jablonka 79, 1037 Budapešť, Maďarsko) vykonala preskúšanie podľa Európskej normy EN 149: 2001 + A1 - Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Filtračné polmasky na ochranu proti časticiam - Požiadavky, skúšanie a označovanie (Ochranná trieda FFP2) a vydala certifikát č. : VD35 / 283/2103 / E / 2233.

VYROBENÉ V ČR

Výrobca: Nano Medical s.r.o. | 5. května 65, 140 00 Praha 4
Distribútor: Rehasport Trade s.r.o. | Obchodní 107, 251 01 Čestlice
www.rehasport.cz | info@rehasport.cz | +420 800 200 900

